

LEADING REGENERATION

Geistlich

Geistlich Fibro-Gide®

*Alternatywa do przeszczepu tkanki łącznej.
Dla Ciebie i Twojego pacjenta.*

NEW
SIZES



Poszerzenie naszego portfolio produktów do tkanek miękkich – Dla Ciebie i Twoich pacjentów

Geistlich Fibro-Gide®

jest teraz dostępny w 4 różnych rozmiarach. Te same wskazania, więcej możliwości leczenia.

- > Wygoda: Teraz dostępny w wersji o zmniejszonej grubości do 3 mm
- > Łatwa obsługa: wygodny w użyciu, zwilż, dotnij i zaszyj¹
- > Bez pobierania z podniebienia: alternatywa do tkanki własnej pacjenta pozyskiwanej z podniebienia²
- > **Wybór pacjentów: 66,7% pacjentów woli Geistlich Fibro-Gide® niż przeszczep tkanki łącznej³**
- > Co więcej: zastosowanie Geistlich Fibro-Gide® zmniejsza odczuwanie bólu przez pacjenta i skraca czas przebywania na fotelu^{4,5}



Grubość 6 mm: 15 x 20 i 20 x 40

Grubość 3 mm: 15 x 20 i 20 x 40

NEW

Leczenie mnogich recesji dziąseł

Dr. Raffaele Cavalcanti | Bari, Italy



1 Sytuacja wyjściowa: liczne recesje tkanek (klasy I wg Millera) z tkanką zrogowaciałą mniejszą niż 3 mm w miejscu od 12 do 14.



2 3 mm Geistlich Fibro-Gide® umieszcza się w miejscu ubytku i natychmiast wchłania krew.



3 Pozycjonowanie Geistlich Fibro-Gide® i mocowanie pojedynczymi szwami (szwy 7-0 PGA).



4 Kontrola po 12 miesiącach: osiągnięto całkowite pokrycie korzeni za pomocą Geistlich Fibro-Gide®.

Zredukowana grubość

– Ten sam niezawodny produkt



„Geistlich Fibro-Gide® o grubości 3 mm pasuje do większości miejsc pojedynczych braków tkanek, co jeszcze bardziej skraca mój czas poświęcany na zabieg.”


Prof. Daniel Thoma | Zürich, Switzerland

Pogrubienie tkanek miękkich wokół implantów dentystycznych i pod przęsłami protetycznymi


Prof. Jan Cosyn | Gent, Belgium




1 Widok przedoperacyjny pokazujący brak wypukłości od strony przedsionkowej.

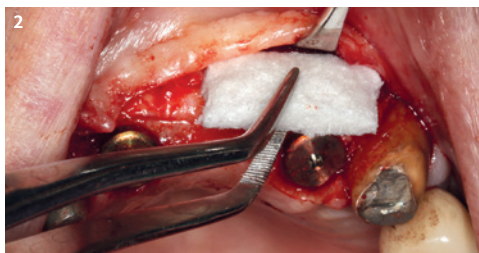

2 Po odwarstwieniu płata śluzówkowo-okostnowego pełnej grubości, wszczepiono implanty w pozycji 11 i 22 oraz założono dwa Geistlich Fibro-Gide® 3 mm.

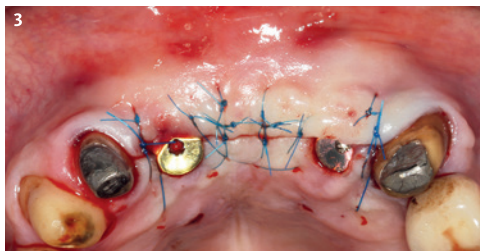

3 Pierwotne zamknięcie rany.

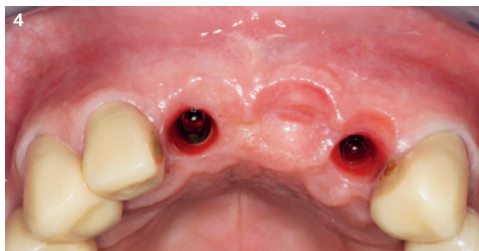

4 Profil wylaniania 3 miesiące po kondycjonowaniu tkanki miękkiej tymczasowym mostem.

Odkryj nasze rozwiązanie dla tkanek miękkich

Wprowadź innowacje do swojej praktyki bez konieczności pobierania tkanek z podniebienia

Chcesz dowiedzieć się więcej o procedurach "palate free"?



Interesują Cię inne koncepcje leczenia?



MEDIF
DENTISTRY

Biurow Obsługi Klienta
+48 22 338 70 50
www.medif.com



Więcej informacji o nas
i naszych partnerach:
www.geistlich-biomaterials.com

 **swiss made**



Geistlich Fibro-Gide®

Grubość 6 mm: 15 x 20 i 20 x 40

Grubość 3 mm: 15 x 20 i 20 x 40

NEW

References

- 1 Data on file. Usability test Geistlich Fibro-Gide® 2020
- 2 Thoma DS et al.: J Clin Periodontol 2016; 43 (10), 874–85.
- 3 McGuire, M. et al.: 2021 Jul 21. doi: 10.1002/JPER.21–0131
- 4 Thoma DS et al.: J Clin Periodontol 2016; 43 (10), 874–85
- 5 De Angelis P, et al.: Int J Oral Maxillofac Surg. 2021;50(7):956–6313